

Labor - Lanzetten



Sicherheitslanzetten Ultrasafe 17 G, 1,40 mm x 2,0 mm, grün (100 Stück)

ArtNr: 19170013
PZN: 19264782
Umkarton: 10 Packungen
Unverb. Preisempf.: 9,50 €

10,50 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Funktion kann nur einmal ausgelöst werden
- Lanzette verschwindet wieder in der Schutzvorrichtung

Anwendung:

1. Schutzkappe vorsichtig abdrehen
2. Lanzette ansetzen (Kontaktaktivierung) -> kein "Leerstechen" möglich
3. Lanzette durch Andrücken auslösen -> Klicken
4. Lanzette komplett entsorgen