

Labor - Lanzetten



Sicherheitslanzetten UltraSafe 30 G, 0,30 mm x 1,8 mm, türkis (100 Stück)

ArtNr: 19170019
PZN: 19996261
Umkarton: 10 Packungen
Unverb. Preisempf.: 9,50 €

10,50 €

zzgl. MwSt.

Beschreibung:

- Funktion kann nur einmal ausgelöst werden
- Lanzette verschwindet wieder in der Schutzvorrichtung

Anwendung:

1. Schutzkappe vorsichtig abdrehen
2. Lanzette ansetzen (Kontaktaktivierung) -> kein "Leerstechen" möglich
3. Lanzette durch Andrücken auslösen -> Klicken
4. Lanzette komplett entsorgen